

Instructions For Use



CE

EC	REP
----	-----

Italiano

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.

Avvertenza: qualora si dovesse manifestare un aumento del dolore o del gonfiore o altre reazioni inusuali durante l'uso del prodotto, rivolgersi immediatamente a un medico. Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo da parte di un singolo paziente. Non si garantisce che l'uso del prodotto possa prevenire eventuali lesioni.

A. Aprire tutte le chiusure a velcro e infilare la mano nella maglina tubolare della Stockinette. Collocare il guscio palmare in modo che corrisponda alla curvatura del palmo.

B. Stringere bene le due chiusure a strappo con lacci e fissarle al supporto per polso.

C. Stringere la cinghietta per pollice e fissarla al supporto per polso.

Istruzioni di lavaggio: prima di inserire in lavatrice, chiudere tutte le cinghie di chiusura. Lavare a mano o in lavatrice con ciclo delicato in acqua tiepida con un detersivo per delicati senza candeggina. Risciacquare abbondantemente. Lasciare asciugare all'aria.

Garanzia: i prodotti fabbricati da Med Spec sono corredati di una garanzia limitata contro i difetti materiali o di esecuzione valida per un periodo di sei mesi dalla data della spedizione. Per il reso del prodotto, rivolgersi al fornitore presso cui è stato effettuato l'acquisto.

Tripod™ Wrist Lacer

Instructions For Use



EC	REP
----	-----



Nederlands

Dansk

Svensk

Suomi

Norsk